

FLOWPACK-HALTERUNG

Hygienisch sicher bis zum letzten Tuch

Gebrauchshinweise | Mai 2018

Allgemeine Hinweise:


- Es wird eine manuelle Reinigung/Desinfektion der Flowpack-Halterung empfohlen. Nicht autoklavierbar.
- Um die Flowpack-Halterung vor Kratzern und Korrosion zu schützen empfehlen wir die Reinigung/Desinfektion mit Meliseptol® Wipes sensitive.
- Beim Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln wird das Tragen von Handschuhen empfohlen.



Halterung in geschlossenem Zustand.



Halterung entriegeln und die Öffnung mit der Führungsschiene nach oben schieben.

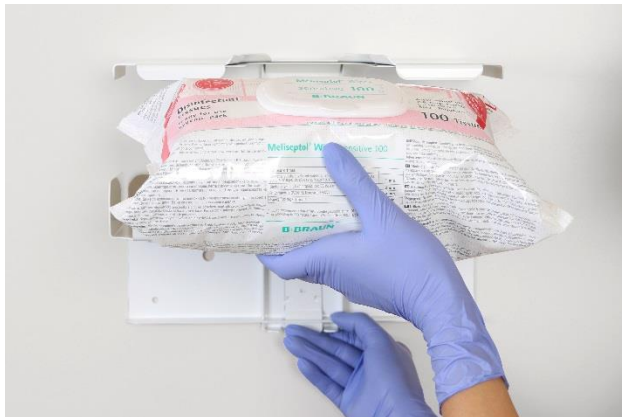

Flowpack-Deckel an der Einführungshilfe einschieben, bis der Deckel einrastet.



Führungsschiene entriegeln – Vorsicht! Obere Halterung geht nach unten.



Die obere Halterung liegt auf dem Flowpack auf und sichert dieses vor dem Herausfallen.



Die obere Halterung läuft frei mit und senkt sich mit jedem entnommenen Tuch. Die Tücher werden direkt von oben entnommen, ohne dass in die Packung gegriffen werden muss.

Hygienisch sicher bis zum letzten Tuch!



Leere Packung mit heruntergefahrener oberer Halterung – das Flowpack kann gewechselt werden.



Flowpack am Deckel von hinten nach vorne aus der Halterung herauschieben und entsorgen.