


# Vergleich des Sicherheitsmechanismus der Venenpunktionsbestecke Venofix® Safety

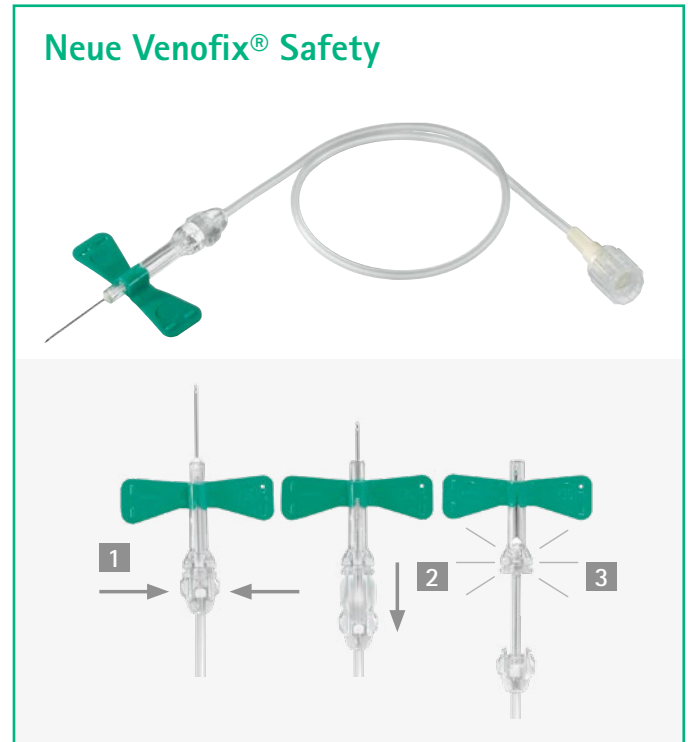

## AKTIVER SICHERHEITSMECHANISMUS

1. Fingerstopper leicht gedrückt halten
2. Transparentes Gehäuse mit Daumen und Mittelfinger zurückziehen, bis
3. die irreversible Aktivierung des Sicherheitsmechanismus durch ein spürbares Einrasten und hörbares Klickgeräusch bestätigt wird

Name	Farbcode	Art.-Nr	PZN
Venofix® Safety 25G, 0,5 x 19 mm, 30 cm	■	4056502-01	08839860
Venofix® Safety 23G, 0,65 x 19 mm, 30 cm	■	4056503-01	08839883
Venofix® Safety 21G, 0,8 x 19 mm, 30 cm	■	4056504-01	08839908
Venofix® Safety 19G, 1,1 x 19 mm, 30 cm	■	4056505-01	08839920
Venofix® Safety 21G, 0,8 x 19 mm, 18 cm	■	4056506-01	08839937

## AKTIVER SICHERHEITSMECHANISMUS

1. Beide Seiten des transparenten Gehäuses mit Daumen und Mittelfinger zusammendrücken
2. Gehäuse zurückziehen, bis
3. die irreversible Aktivierung des Sicherheitsmechanismus durch ein hörbares Klickgeräusch bestätigt wird

Name	Farbcode	Art.-Nr	PZN
Venofix® Safety 25G, 0,5 x 19 mm, 30 cm	■	4056502N	17935315
Venofix® Safety 23G, 0,65 x 19 mm, 30 cm	■	4056503N	17935321
Venofix® Safety 21G, 0,8 x 19 mm, 30 cm	■	4056504N	17935338
Venofix® Safety 19G, 1,1 x 19 mm, 30 cm	■	4056505N	17935344
Venofix® Safety 21G, 0,8 x 19 mm, 19 cm	■	4056506N	17935373