



Sicher Spülen mit dem B. Braun-System

Das Spüllösungsprogramm
in Ecobag® CE Click, Ecolav® und Ecotainer®

Ecobag® CE click


Immer die beste Verbindung ... passt sich jeder Bewegung an



Portsystem durch Abdrehen der Verschlusskappe öffnen.



Ecoclick®-Konnektor bis zur Rastung in den Port drücken.

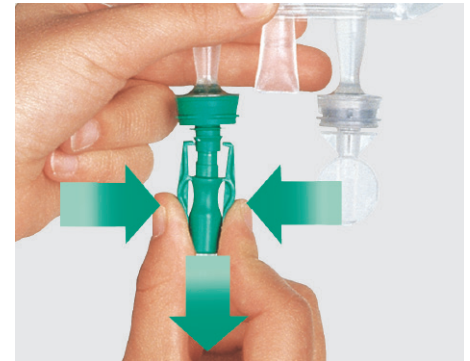

Zum Dekonnektieren Seitenflügel drücken und Ecoclick® herausziehen.

Spüllösungsbeutel mit innovativem Verschlusssystem: leichtes Konnektieren und 360° Beweglichkeit

Nur ein kurzes Klicken und der Ecobag® CE Click ist angeschlossen. Fest und kontaminationssicher. Der flexible, drehbare Kopf der Ecoclick®-Überleitungsgeräte passt sich jeder Bewegung an und erleichtert so die Handhabung. Ein Verhaken oder Verklemmen des Schlauches wird vermieden. Und mit einem leichten Druck auf die Seitenflügel wird der Verschluss wieder gelöst. Der Port verschließt sich sofort vollständig.



- Komfortables Handling durch 360° flexiblen Drehkopf
- Leichte und sichere Arretierung des Überleitungsgerätes im Portsystem
- Wiederabdichtende Ports

Ecolav®

Mit sanftem Druck präzise spülen ... und dabei Zeit und Kosten sparen



Druckanwendung:

Ein geringer Druck auf die weiche Flasche bewirkt einen feinen, präzisen Strahl der Spüllösung.



Punktformige Anwendung:

Der 30-ml-Minidosis-Behälter erlaubt eine auf den Punkt genaue Anwendung der Spüllösung.



Estericlean® (500 ml)

Sterile Spüllösung mit Schutzverpackung

Flexibler Spülbehälter für punktgenaue, effiziente Anwendungen

Das weiche Material des Ecolav®-Behälters (Polyethylen) und der Spülkonus ermöglichen eine punktgenaue Spülung durch sanften Druck der Flasche.

Aufgrund der verschiedenen Behältergrößen ist Ecolav® für viele Anwendungsgebiete geeignet. Durch die abdrehbare Verschlusskappe wird sofort mit der Anwendung begonnen – ohne Spritze, ohne Nierenschale.



- **Zeitersparnis:** Reduzierter Vorbereitungsaufwand, Verschluss abdrehen, sofort verwenden
- **Kostensparnis:** Ohne zusätzlichen Materialeinsatz anzuwenden

Ecotainer®

Alles im Griff ... mit Sicherheit

Ecotainer® für großvolumige Spüllösungen:
sichere Handhabung, kein Verschütten beim
Ausgießen

Ecotainer® besteht aus unzerbrechlichem,
umweltfreundlichem Polypropylen. Er
wurde so konzipiert, dass ein Verschütten
des Inhalts unabhängig vom Ausguss-
winkel nicht möglich ist. So können auch
großvolumige Spüllösungen zielgenau
dosiert werden.

Durch die Griff-Taille liegt der Behälter
immer fest in der Hand. Besondere Sicher-
heit bietet der Ecotainer® aufgrund der
verschieden farbigen Verschlusskappen,
die eine schnelle und sichere Zuordnung
der unterschiedlichen Spüllösungen
ermöglichen:

- Ringer
- NaCl 0,9%
- Aqua B. Braun



Die farbcodierten Verschlusskappen sind leicht zu
öffnen. Und der weiße Versiegelungsring ist eine sicht-
bare Garantie für die Originalität der Spüllösung.



Die spezielle Form des Ecotainers hilft, dass beim
Ausgießen der Spüllösung kein Tropfen daneben
geht – auch bei voll gefülltem Behälter und steilem
Ausgusswinkel. Zusätzlich sorgt die Messkala für
eine exakte Dosierung je nach Anwendungsgebiet.




- Ermöglicht eine genaue Dosierung
- Liegt besonders gut in der Hand
- Ermöglicht eine eindeutige
Zuordnung der unterschiedlichen
Spüllösungen durch farbcodierte
Verschlusskappen

Überleitungsgeräte für Ecobag® CE Click

Ecobag® CE Click und marktübliche Beutelsysteme

Länge 210 cm	patientenseitiger Konusansatz mit 15 cm Silikonschlauch	
mit Ecoclick® Konnektor	Ecoclick® Nr. 1	einläufig
	Ecoclick® Nr. 2	zweiläufig, mit Rasterklemmen
	Ecoclick® Nr. 4	einläufig, mit Rücklaufsperr
mit Ecospike Einstechdorn	Ecospike Nr. 1	einläufig
	Ecospike Nr. 2	zweiläufig, mit Rasterklemmen
	Ecospike Nr. 4	einläufig, mit Rücklaufsperr
Länge 260 cm	patientenseitiger Konusansatz mit 15 cm Silikonschlauch	
mit Ecospike Einstechdorn	Ecospike Nr. 2	zweiläufig, mit Rasterklemmen
Länge 330 cm (Arthros)	patientenseitiger Konusansatz mit 15 cm Silikonschlauch	
mit Ecoclick® Konnektor	Ecoclick®-Arthros Nr. 1	
mit Ecospike Einstechdorn	Ecoclick®-Arthros Nr. 1	
Länge 330 cm (Arthros)	patientenseitiger Luer-Lock-Anschluss	
mit Ecoclick® Konnektor	Ecoclick®-Arthros Nr. 2	
mit Ecospike Einstechdorn	Ecoclick®-Arthros Nr. 2	

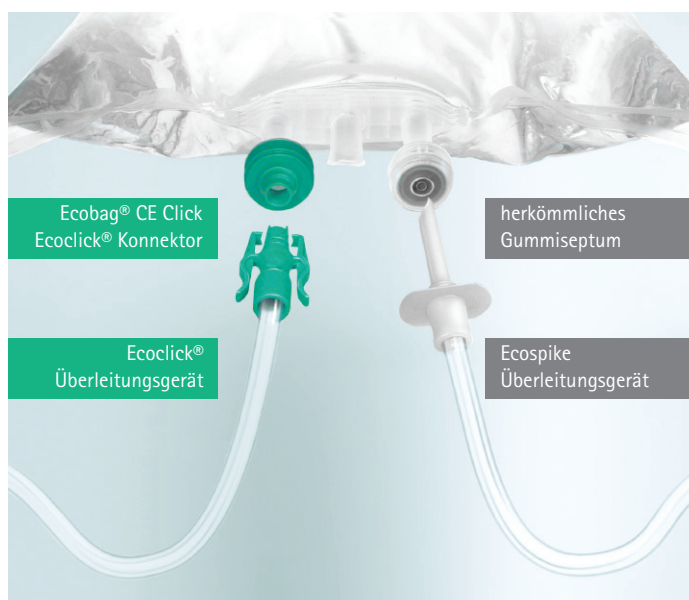





Ecobag® CE Click ist universell einsetzbar

Ein Beutel, zwei Alternativen – durch das Doppelportsystem ist Ecobag® CE Click auch mit herkömmlichen Überleitungsgeräten mit Einstechdorn kompatibel.

Sicher Spülen mit dem B. Braun-System

Das Spüllösungsprogramm in Ecobag® CE Click, Ecolav® und Ecotainer®

Ecolav®		NaCl 0,9%		Ringer-Lactat		Aqua	
	Größe	REF	PZN	REF	PZN	REF	PZN
	100 x 30 ml	3570310	4454809	3570490	6062657		
	20 x 100 ml	3570350	4454815	3570500	6062663	387872	0202608
	20 x 250 ml	3570380	4463636			387873	0202614
	10 x 500 ml	3570410	4499344	3570510	6062686	387874	0202620
	Estericlean® 10 x 500 ml	3570470	6063059				
Ecotainer®		NaCl 0,9%		Ringer		Aqua	
	Größe	REF	PZN	REF	PZN	REF	PZN
	10 x 500 ml	3570130	6063036	3570010	6062628	0082423E	0088986
	6 x 1.000 ml	3570160	6063042	3570030	6062634	0082479E	0088992
Ecobag® CE Click		NaCl 0,9%		Ringer		Glycine 1,5%	
	Größe	REF	PZN	REF	PZN	REF	PZN
	4 x 3.000 ml	FREU930	8473643	FREU944	8488886	FREU934	0498336
	2 x 5.000 ml	FREU970	8473666	FREU984	8488892	FREU974	0498342
	Größe					Sorbitol / Mannitol 3%	
	4 x 3.000 ml					FREU938	0498419
	2 x 5.000 ml					FREU978	0498425
Überleitungsgerät mit Ecoclick® Konnektor				Ecospike Überleitungsgerät Einstechdorn			
	Typ (je 25 Stück)	REF	PZN	Typ (je 25 Stück)	REF	PZN	
	Ecoclick® Nr. 1	2112269	0498632	Ecospike Nr. 1	2112268	0498603	
	Ecoclick® Nr. 2	2112271	0498649	Ecospike Nr. 2	2112270	0498626	
	Ecoclick® Nr. 4	2112272	1795734	Ecospike Nr. 2 (Länge: 260 cm)	2112539	-	
	Ecoclick® Arthros Nr. 1	2112277	0498572	Ecospike Nr. 4	3806073	0949974	
	Ecoclick® Arthros Nr. 2	2112279	0498589	Ecospike Arthros Nr. 1	3804003	7479661	
	Verbindungsleitung 60 cm Luer Lock*	2112274	-	Ecospike Arthros Nr. 2	2112278	0498595	

*je 50 Stück