
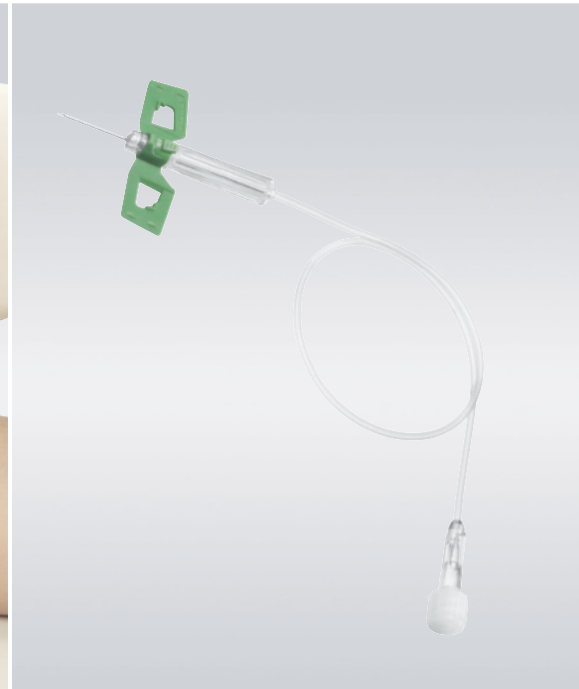


Venofix[®] Safety

Venenpunktionsbesteck mit Sicherheitsmechanismus

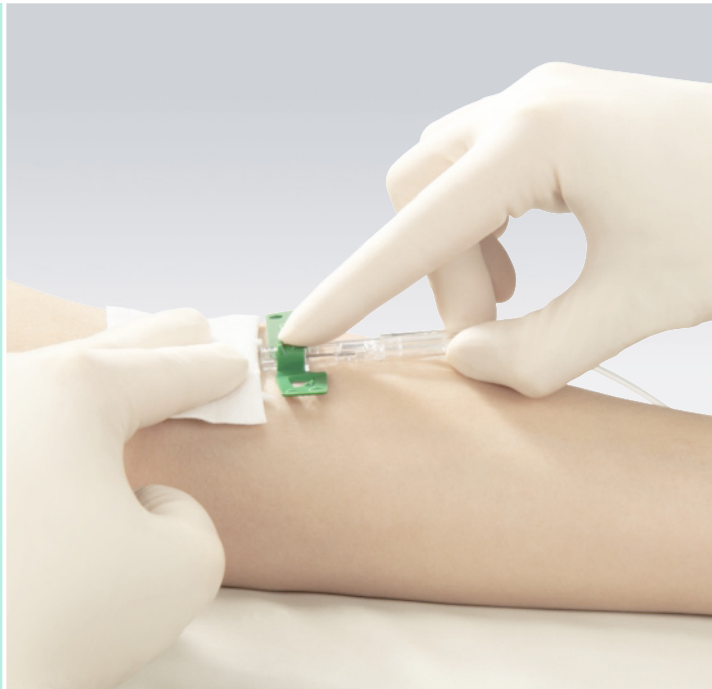

Infusion

Die sicheren Arbeitsgeräte von B. Braun erfüllen die Vorgaben der TRBA 250, Abschnitt 4.2.5 „Prävention von Nadelstichverletzungen“

Venofix® Safety

Venenpunktionsbesteck mit Sicherheitsmechanismus

Abrechenbarer Sprechstundenbedarf*

Das Sicherheits-Venenpunktionsbesteck Venofix® Safety kombiniert hohen Anwendungskomfort mit einfachem Handling. Venofix® Safety kann für Kurzinfusionen, Injektionen, Transfusionen und die Blutentnahme verwendet werden. Die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus in der Vene sorgt für ein Mehr an Sicherheit. Der flexible, DEHP-freie Schlauch verhindert ein Abknicken und somit ein Unterbrechen der Infusionstherapie. Die großen, flexiblen Flügel ermöglichen eine leichtere Punktion und Fixierung.




1 Venenpunktion

Halten Sie die Kanüle an den nach oben geklappten Flügeln und punktieren Sie in einem Winkel von 10°–20°. Die erfolgreiche Venenpunktion wird durch den Blutrückfluss in die transparente Kammer hinter dem Katheteransatz bestätigt.



2 Fixierung

Bitte beachten Sie bei der Fixierung der Venofix® Safety, dass der Druckknopf des Sicherheitsmechanismus und das transparente Gehäuse frei bleiben, um die Aktivierung nicht zu behindern.

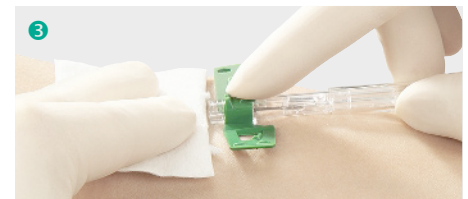

3 Aktivieren

durch leichten 2-Fingerdruck und Zug des Gehäuses

Der Safety-Mechanismus – intuitiv und einfach mit einer Hand zu aktivieren!

Drücken Sie den Knopf auf dem Kanülenansatz, halten Sie diesen gedrückt und ziehen Sie diesen zurück, bis ein Klick zu hören ist und sich der Sicherheitsmechanismus irreversibel aktiviert hat. Hör- und fühlbar ... und so einfach!



Größe (G)	Größe (Ø mm)	Stichlänge (mm)	Schlauchlänge (cm)	Durchflussrate (ml/min)	REF	PZN	VE	AE-Preis/Stück (in Euro)	Ihre Bestellung (Anzahl VE)
27	0,4	14	30	2,1	4056501-01	08839848	50 St.	0,68	
25	0,5	19	30	5,9	4056502-01	08839860	50 St.	0,68	
23	0,65	19	30	14,3	4056503-01	08839883	50 St.	0,68	
21	0,8	19	30	32,4	4056504-01	08839908	50 St.	0,68	
21	0,8	19	18	34,8	4056506-01	08839937	50 St.	0,68	
19	1,1	19	30	60,2	4056505-01	08839920	50 St.	0,68	

* Bitte beachten Sie die jeweilige, regionale Sprechstundenbedarfsvereinbarung. **Achtung: Das Produkt ist bei der Verwendung zur Blutentnahme nicht für den Sprechstundenbedarf verordnungsfähig.**

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (s. Homepage).



Für weitere Informationen zum Thema scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone und einer geeigneten Reader-Applikation ein.

Weitere Informationen zu unseren sicheren Arbeitsgeräten finden Sie auf unserer Website www.ambulant-bbraun.de

Absender: Name/Adresse/Praxisstempel

X

X

Datum

X

Unterschrift