

# Venofix® Safety

## Anwendungshinweise




### Venenpunktion

Desinfizieren Sie den Punktionsbereich vor der Punktion gemäß den hausinternen Richtlinien. Halten Sie die Kanüle an den nach oben geklappten Flügeln und punktieren Sie in einem Winkel von 10° bis 20°. Der Blutrückfluss in der transparenten Kammer hinter dem Katheteransatz bestätigt die erfolgreiche Venenpunktion.



### Fixierung

Bitte achten Sie bei der Fixierung der Venofix® Safety darauf, dass der Druckknopf des Sicherheitsmechanismus und das transparente Gehäuse frei bleiben, um die Aktivierung nicht zu behindern.

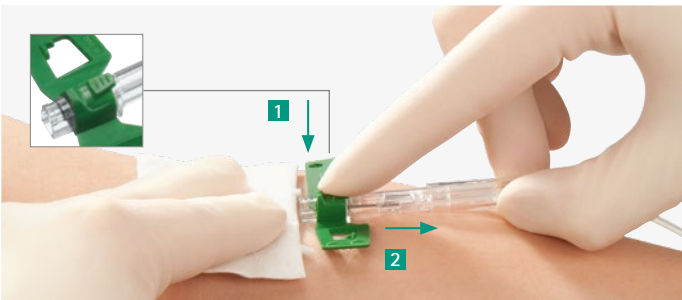


### Aktivierung des Sicherheitsmechanismus in der Vene – für Ihre Sicherheit

Drücken Sie mit dem Zeigefinger auf den Druckknopf und halten Sie diesen gedrückt. Mit Daumen und Mittelfinger ziehen Sie anschließend die transparente Kammer zurück, bis der Sicherheitsmechanismus mit einem hör- und spürbaren Klicken einrastet.



### Entsorgung

Nutzen Sie für die Entsorgung der Venofix® Safety die dafür vorgesehenen speziellen Kanülenabwurfbehälter und Container.

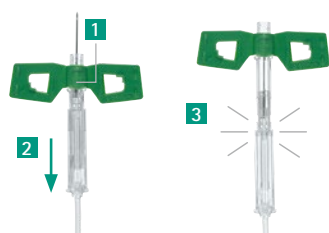

#### SICHERHEITSMECHANISMUS

- **1 Drücken** Sie den Knopf auf dem Kanülenansatz, halten Sie diesen gedrückt und
- **2 Ziehen** Sie den Katheteransatz zurück bis
- ein hörbarer **3 Klick** erfolgt

#### SICHERHEITSMERKMALE

- Einfacher Einhand-Aktivierungsmechanismus
- Aktivierung in der Vene: Die Kanüle ist berührungssicher umschlossen
- Der hörbare Klick bestätigt, dass der Mechanismus aktiviert ist
- Einmal aktiviert, ist der Mechanismus irreversibel

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website:

[www.bbraun.de/venofixsafety](http://www.bbraun.de/venofixsafety)