

AESCULAP® Sterilcontainer Funktionsprüfung


PRIMELine® PRO Sterilcontainer

Alle Bestandteile des Sterilcontainers sind vor jedem Einsatz visuell auf Beschädigungen und korrekte Funktion zu prüfen. Für den sicheren Einsatz ist die Beachtung der Gebrauchsanweisung TA015110-DE zwingend notwendig. Falls Ihnen die neueste Ausgabe der Gebrauchsanweisung nicht vorliegt, wenden Sie sich bitte an Aesculap.


1. Metallteile nicht verformt



Containerwanne und Deckel überprüfen.

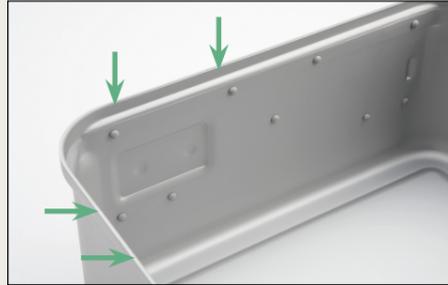

Keine Dellen im Wannenrand.

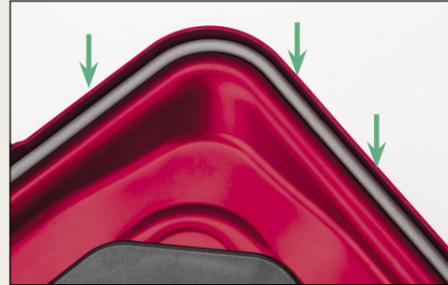

Keine Dellen im Deckelrand. Aluminiumdeckel nicht verzogen.

2. Unversehrte Dichtungen



Dichtungen sind vorhanden und unversehrt. Keine Risse, Brüche, usw.

3. Filterinspektion



Lamellenplatte zur Überprüfung abnehmen (Drehbewegung).



PRIMELine® Filter unbeschädigt (keine Knicke, Löcher, Risse oder Spalten). Filter bleibt bei der Überprüfung in der Kartusche.

4. Funktionstüchtiger Verschluss



Dreiecke zeigen zueinander (eingerrastet).



Der Verschluss ist funktionstüchtig und weist keine Beschädigungen auf. Verschlusscharniere gelegentlich mit Sterilit® I ölen (JG600).



5. Richtige Deckelschließung



Deckel und Wanne justieren ohne Druck.



Verschluss des Deckels rastet hörbar in das Gegenstück an der Wanne ein.

6. Unversehrte Tragegriffe



Tragegriffe sind unversehrt und zeigen keine Beschädigungen auf.

7. Unbeschädigte Sterilcontainer



Nur unbeschädigte Sterilcontainer verwenden. Beschädigte Teile sofort durch Originalersatzteile ersetzen oder reparieren (Aesculap Technischer Service)

8. Kennzeichen und Verplomben



Sterilcontainer verschlossen. Wahlweise mit Produktionsetikett verplombt oder Produktionsetikett und Kunststoffplombe angebracht.

